



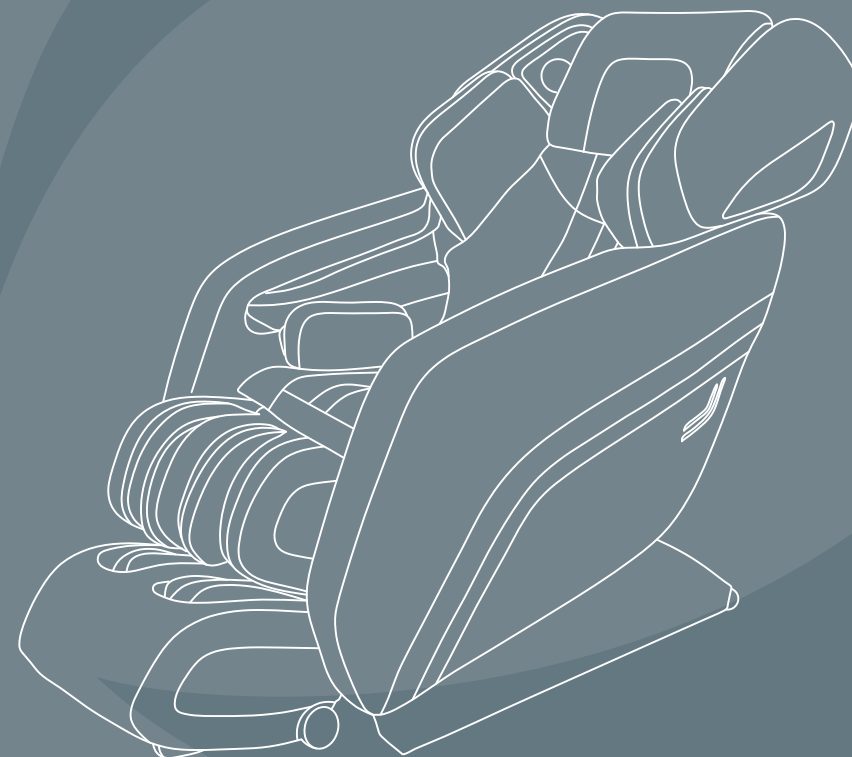

Массажное кресло Ergonova Organic 4 RK Espresso Brown

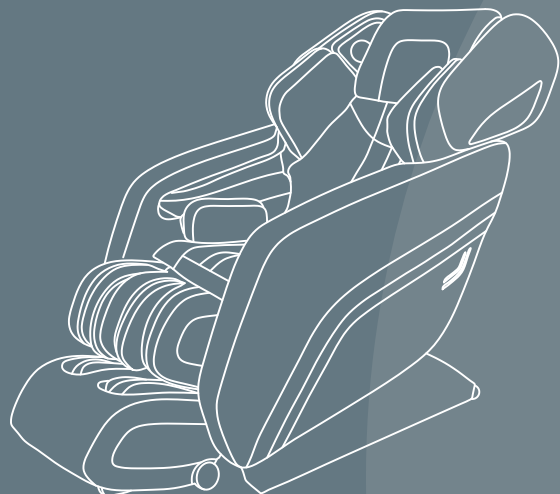

Made by ERGONOVA Germany



www.ergonova.com

«Инструкция по эксплуатации»

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с Инструкцией по эксплуатации перед началом использования массажного кресла

1. Благодарим Вас за выбор нашего массажного кресла.
2. Прочитайте внимательно Инструкцию по эксплуатации перед началом использования массажного кресла.
3. Сохраните инструкцию на весь период эксплуатации массажного кресла.
4. Уделите внимание пункту «Техника Безопасности».

Мы оставляем за собой право внести изменения в конструкцию массажного кресла. Оно может быть изменено без предварительного уведомления. Рисунки, расположенные в Инструкции по эксплуатации являются справочным материалом.

Содержание

ПОДГОТОВКА	Правила техники безопасности	4
	Описание внешних элементов	8
	Описание внутренних элементов	9
	Устройство внутренних механических компонентов	10
	Список механических компонентов	11
УСТАНОВКА	Установка	12
ОПЕРАЦИИ МАССАЖА	Регулировка массажного кресла перед массажем	19
	Пульт Управления	21
	Инструкция по эксплуатации и иллюстрации функций	25
	После массажа	27
ОБСЛУЖИВАНИЕ	Очистка и обслуживание	28
ДРУГОЕ	Неисправности	29
	Технические данные	30

Пожалуйста, сохраните инструкцию на весь период эксплуатации массажного кресла

Массажное Кресло Series RK



Введение

1. С помощью интеллектуальной мощной 3D-массажной роликовой системы, кресло может делать массаж на шее, плечах, спине и пояснице с регулируемой силой от слабого до ультра сильного; имитируя традиционные китайские методы медицинского массажа, что позволит вам наслаждаться ощущениями от массажа как от настоящего профессионального массажиста; кроме того, кресло позволяет произвести уникальный массаж плеч.
2. С функцией отслеживания акупунктурных точек, кресло может проводить точный массаж разным людям в соответствии их ростом и формой тела.
3. Автоматическая настройка. Сиденье, спинка и массажер ног можно регулировать по отдельности с помощью автоматических электроприводов согласно своим предпочтениям или перевести кресло в режим "невесомости" (или "нулевой гравитации") одним нажатием кнопки. Положение "невесомости" поднимает над головой ноги и освобождает от любой нагрузки на спину, улучшая кровообращение мозга и его оксигенацию.
4. Функция скольжения вперед. Спинка и рама сиденья сдвигается вместе и вперед, что позволяет ставить кресло вплотную к стене (10 см.). Это позволяет в полной мере использовать пространство, создает гармонию.
5. Встроенная аудиосистема MP3, может воспроизводить музыку с флеш-дисков, поможет вам создать нужное настроение с любимой музыкой, и снять умственную усталость.
6. Массажер-подставка для ног с функцией роликового и воздушного массажа, воздействует через стопы на меридианы тела, эффективно регулирует и восстанавливает функцию органов человека, улучшает сопротивляемость организма и иммунитет.
7. Запатентованная методика рефлексологии с несколькими воздушными подушками в области ног, позволяет массировать и разминать голени, лодыжки и ноги.
8. Регулируемое от умеренного до очень сильного давление воздуха в массажных подушках на руках, плечах, вдоль всего тела и ногах, способствует циркуляции капиллярной крови, улучшает трофику тканей, разминает все мышцы.
9. Подставка для ног и стоп могут устанавливаться под любым углом, если это необходимо, может раздвигаться на 20 см, чтобы подстроиться под любой рост.
10. Красочный цветной ЖК-контроллер, иллюстрирует все детали массажа и текущий статус процедуры.
11. Уникальная китайская медицина тепловая терапия в сиденье и спине, способствует циркуляции крови, уменьшает спастические боли, дарит приятные ощущения.

Правила техники безопасности





- Перед использованием изучите инструкцию для правильного использования, особенно о вопросах безопасности.
- Сохраните эту инструкцию для последующего обращения.






Уделите больше времени технике безопасности.





 Предупреждение	Этот знак указывает об опасности для жизни
 Осторожно	Этот знак указывает на возможность нанесения повреждений или травм

Расшифровка символов

	Недопустимое поведение		Правила использования массажного кресла
	Запрещено самостоятельно ремонтировать		Использование шнура питания

 Внимание		
	<p>Следующие проконсультироваться с врачом перед использованием кресла:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Людям кто страдает от серьезных заболеваний сердца. • Женщины, которые беременны или во время менструаций • Имеющие заболевания позвоночника, особенно с искривлениями; лица перенесшие операции или травмы позвоночника • Лица с сильным остеопорозом. • Лица с расстройствами восприятия (тактильного, психического). • Лица с кардиостимуляторами, имплантами. • Лица с нарушением кровообращения в нижних конечностях, лица с варикозной болезнью вен. • Лица, чувствительные к теплу должны проявлять особую осторожность при использовании прибора. 	Люди, которым не подходит использование массажного кресла
	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что вокруг кресла во время регулировки положения спинки для ног нет детей или домашних животных; • Если вы почувствовали дискомфорт, прекратите массаж и обратитесь к врачу; • Не используйте интенсивный массаж на голове; • Не массируйте живот или колени, будьте осторожны во время массажа шеи; • Дети и домашние животные не должны играть в массажном кресле, особенно во время массажа. Не допустимо сидеть на спинке или подлокотниках; • Люди с нарушением двигательной функции должны пользоваться креслом под присмотром. 	Во избежание возможных травм или несчастных случаев
	<ul style="list-style-type: none"> • Подключите шнур питания в подходящую по напряжению и конструкции розетки. Убедитесь, что вилка плотно сидит в розетке; • Отключите кресло от сети, если не используете его. 	Во избежание пожара и поражения эл. током
	<ul style="list-style-type: none"> • Не сгибайте подушки кресла; • Не оставляйте кресло на долгое время включенным без нагрузки 	Возможные поломки
	<ul style="list-style-type: none"> • Не используйте шнур питания, вилку или розетку если они имеют признаки повреждения; • Запрещено использовать шнур питания с повреждениями 	Пожар, поражение эл. током
	<ul style="list-style-type: none"> • Если кресло работает некорректно, сломано, облито водой, обратитесь в специализированный сервисный центр. Не допускается – самостоятельный ремонт; • Если шнур питания поврежден не ремонтируйте ее самостоятельно, обратитесь в сервисный центр; • Во избежание поражение эл.током, не открывайте и не ремонтируйте кресло. Кресло не предназначено для обслуживания пользователем. • Проверьте целостность обивки кресла, в случае небольших повреждений, выключите кресло и обратитесь в сервисный центр. 	Разборка и ремонт

 Осторожно			
	• Пожалуйста, пользуйтесь креслом на плоской горизонтальной поверхности.	Для предотвращения внезапного падения	
	• Дистанция от спинки кресла до стены 40 см, чтобы было достаточно места для опускания спинки.	Убедитесь, что спинка опускается до конца	
	• Максимальное время сеанса массажа 20 минут. По 5 минут в каждой позиции, начиная с легкого уровня интенсивности. Более продолжительный массаж в одном положении может принести дискомфорт.	Слишком долгий массаж может быть неприятен	
	• Перед тем, как сесть в кресло, убедитесь, что массажные ролики находятся на своем месте.	Для предотвращения травм	
	• Убедитесь, что выключатель находится в положении OFF перед тем, как подключить кресло к сети.		
	• Выключите кресло перед тем, как отключить его от сети.	Чтобы избежать проблем при включении	
	• Убедитесь, что вилка плотно сидит в розетке.	Для предотвращения короткого замыкания и риска возгорания	
	• Убедитесь, что шнур питания не поврежден, на нем нет воды и мусора.	Для предотвращения эл. шока в случае утечки или повреждения	
• Убедитесь, что заземляющий контакт подключен корректно. Он не должен быть загнут или отрезан. 			
	• Не нажимайте руками и не наступайте ногами на массажные ролики.	Для предотвращения аварии или травм	
	• Не помещайте руки между работающими массажными роликами.		
	• Не помещайте руки в щели между механизмами.		
	• Не роняйте и не вставляйте ничего в слот кресла.		
	• Не вставляйте, не садитесь и не кладите ничего на спинку, подлокотники или подставку для ног.		
	• Не вставайте с кресла во время массажа.		
• Не передвигайте работающее кресло.	Чтобы предотвратить стирание, выцветание обивки..		
• Не отключайте от сети работающее кресло.			
• Не кладите руки или голову между подставкой для ног и полом.			
• Не пользуйтесь креслом с укладкой в волосах.			
• Не кладите острые предметы в задние карманы, когда делаете массаж ягодиц и бедер.			
• Не сидите на спинке и не давите на нее, когда кресло возвращается в исходное положение.			
• Не делайте массаж на участках с поврежденной кожей или в тонкой одежде, это может вызвать болезненные ощущения.			
		• Берегите кресло от жары, влажности, острых предметов и агрессивных, горючих, взрывчатых средств.	
		• Запрещено пользоваться в кресле электроодеялом и другими устройствами электрообогрева.	
		• Берегите кресло от обогревателей и других горячих предметов.	
	• Не держите кресло под прямыми солнечными лучами.		
	• Не пользуйтесь креслом на открытом воздухе.		


 Осторожно		
	<ul style="list-style-type: none"> • Не используйте и не храните кресло во влажной среде, в бассейне, ванной комнате и т.п. • Держите кресло и пульт управления сухим. • Не пользуйтесь креслом, когда ваше тело влажное. 	Для предотвращения поражения эл. током
	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что кресло заземлено правильно, в противном случае возможно поражение эл. током, если вы не знаете, как сделать, обратитесь к профессиональному электрику. • Если вилка не соответствует по конструкции розетке, не меняйте ее самостоятельно, обратитесь к профессиональному электрику или в сервисный центр. 	Для предотвращения поражения эл. током
	<ul style="list-style-type: none"> • Отключите кресло от сети, прежде чем заниматься чисткой. • Отключите кресло от сети после использования кресла. • Отключите питание, если есть какие-либо повреждения в системе питания. • Придерживайте розетку при отключении от сети, никогда не дергайте за шнур питания. 	Для предотвращения поражения эл. током и возгорания.
	• Пожалуйста, выключайте питания и отключайте кресло от сети после сеанса массажа.	Для предотвращения несчастных случаев.
	• Отключите кресло от розетки немедленно после того, как пропадет ток в сети.	Для предотвращения несчастных случаев и травм, когда электричество появится.


Инструкция по заземлению

- Кресло оборудовано шнуром питания с приводом заземления. Вилку следует подключать в подходящий разъем, правильно установленный и соответствующий по конструкции.


Замена предохранителя

- Если предохранитель сгорел, пожалуйста, выключите питание и отключите кресло от сети. Откройте крышку отсека предохранителя, которая находится около выключателя. Замените предохранитель таким же, как и старый и закройте крышку. Или обратитесь к профессиональному электрику.

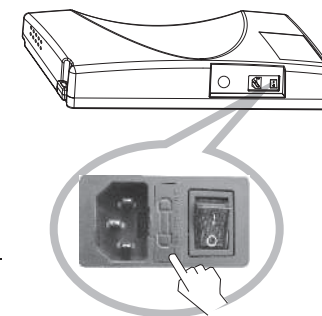


	<p>Провод заземления не должен находиться в следующих местах:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Газопровод: возможен взрыв или возгорание. • телефонный кабель и стержень громоотвода: может вызвать электрический шок и пожар во время грозы. • Водопровод: провод заземления бесполезен там, где есть пластик.
---	--

Описание внешних элементов

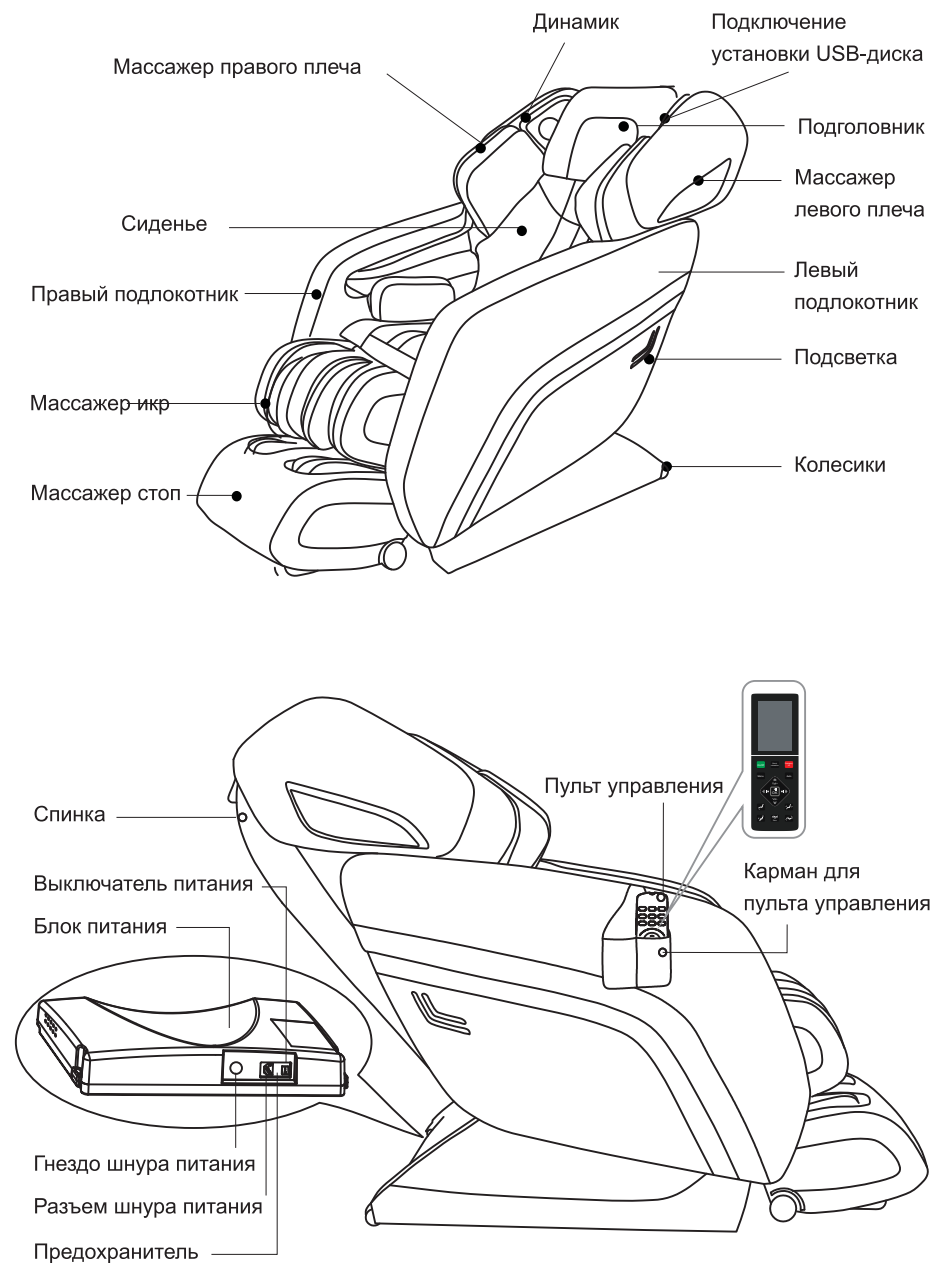


8

Описание внутренних механических элементов. Внутреннее Устройство

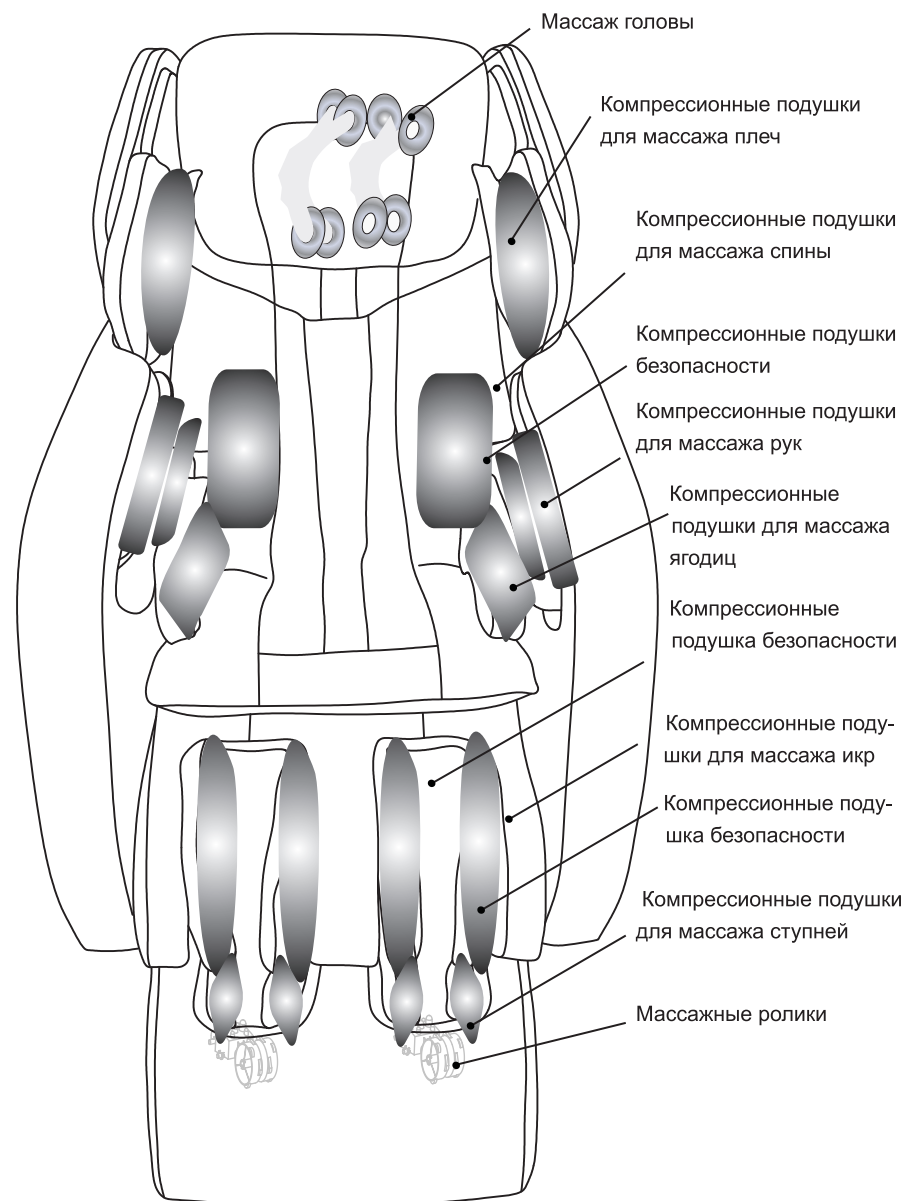

9

Устройство внутренних элементов Схематичная диаграмма

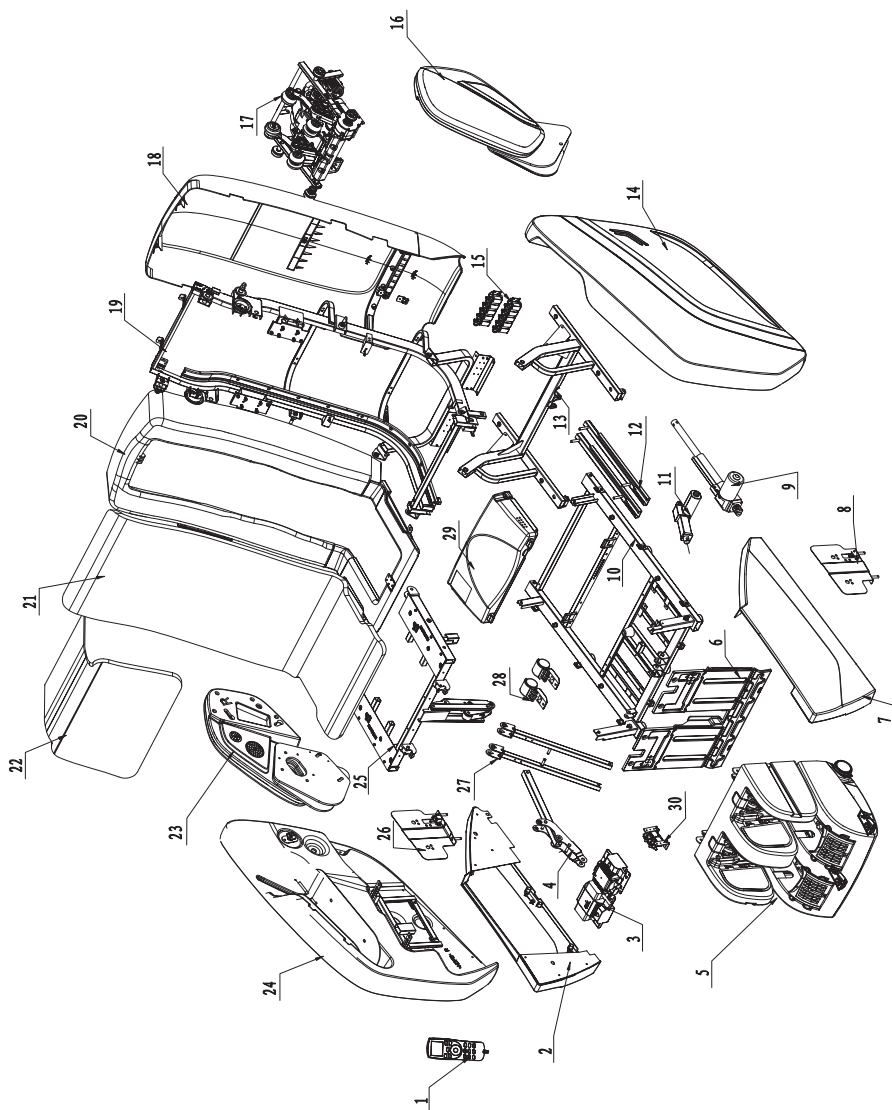

Список внутренних механизмов


№	Наименование	Кол-во	№	Наименование	Кол-во
1	Пульт дистанционного управления	1	22	Подушка	1
2	Правый циток	1	23	Устройство для массажа правого плеча	1
3	Воздушный насос	2	24	Узел правого подлокотника	1
4	Шатун	1	25	Узел поверхности каркаса сиденья	1
5	Подставка для ног	1	26	Правая сторона подушки безопасности сиденья	1
6	Переднее крыло	1	27	Опорная стойка сиденья	2
7	Левое боковое крыло	1	28	Ролик	2
8	Левая сторона подушки безопасности сиденья	1	29	Блок питания в сборе	1
9	Электропривод спинки сиденья	1	30	Магнитный клапан правого подлокотника	1
10	Подножка электрического привода	1			
11	Сборный узел каркаса спинки	1			
12	Направляющая	2			
13	Узел рамы верхнего сиденья	1			
14	Левый подлокотник в сборе	1			
15	Электромагнитный клапан	2			
16	Устройство для массажа левого плеча	1			
17	Массажный механизм	1			
18	Узел задней крышки	1			
19	Задняя крышка в сборе	1			
20	Пластиковая спинка переднего сиденья в сборе	1			
21	Подушка спинки и сиденья	1			

Установка (1)

Шаг 1. Установка массажного кресла.

1. Для установки массажного кресла вам понадобится не менее двух человек, чтобы поднять корпус кресла за левый и правый край металлического каркаса сиденья.
2. Из коробок достаньте спинку, подголовник, сидения и шнуры питания (как это показано на рисунке).


Держите за металлический каркас и вынимайте кресло из коробки.

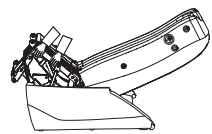


Основной корпус массажного кресла



Подушка подголовника

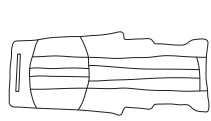

Подушка спинки

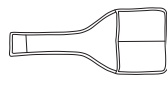

Сумка контроллера

Аксессуары



Правая боковая подушка безопасности сиденья (застежка – молния)




Левая боковая подушка безопасности сиденья (застежка – молния)



Пульт Управления




Электрический кабель

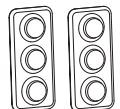


Шиаци панель бедра


Устройства для массажа левого плеча (внутри имеется знак "L")

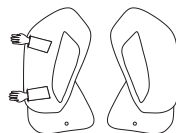

Устройства для массажа правого плеча (внутри имеется знак "R")

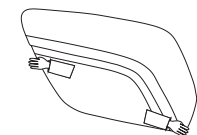


Правый подлокотник

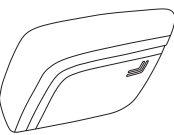

Левый подлокотник

Устройство подножка для ног

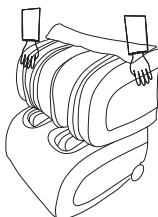

3. Откройте коробку с отметкой «Подголовники». Аккуратно достаньте из упаковки массажеры плеч и оба подлокотника. Положите массажеры для плеч и оба подлокотника на ровную поверхность (для предотвращения царапин). Держите эти части при сборке как указано на рисунке.

4. Откройте коробку с отметкой «Подножка для ног» вынимайте из коробки как показано на рисунке.


Установка (2)

Проверка оборудования

Убедитесь, что спинка сиденья откидывается на достаточное расстояние от стены.

Не менее 30 см от стены

Не менее 10 см от стены

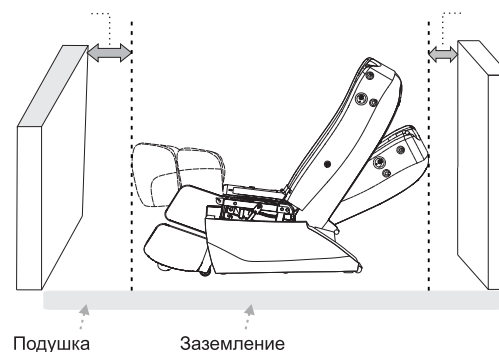

Подушка

Заземление

Осторожно:

- Не используйте массажное кресло в местах с повышенной влажностью, вблизи бассейнов, ванных комнат, во избежание утечки эл.тока.
- Используйте массажное кресло на ровной поверхности, для того, чтобы избежать падение массажного кресла, посторонних шумов или других неожиданных проблем.
- Не используйте массажное кресло под прямыми солнечными лучами или рядом с отопительными приборами, во избежание ухудшения внешнего вида массажного кресла.

По причине что массажное кресло тяжелое, и оно может разрушить ваш пол, положите на пол перед установкой, мат.

Шаг 2. Установка спинки

1. Вставьте один конец шнура питания в розетку блока питания, а другой конец в розетку.
2. Ключ переключателя «ON», массажное кресло в состоянии «ON» - спинка опускается, сиденье поднимается.
3. После возврата спинки, выключите питание и отсоедините вилку питания.



Блоки питания

Вставьте один конец шнура питания в розетку блока питания

Отсоедините вилку

Вставьте вилку шнура питания в розетку

Нажмите кнопку ON/OFF


Массажное кресло возвращается исходную позицию

Установка (3)

Шаг 3. Как собрать подставку для ног

1. Закрепите подножку к основному корпусу массажного кресла, зафиксировав подножку болтами.
2. Воздушную трубу на подножке соедините плотно с каркасом сиденья, соблюдая цвета.
3. Соедините электропитания с розеткой.
4. Поднимите направляющую вала вращения к крючкам, поднимите подголовник руками, положите вал вращения на крючки на основном корпусе и положите на направляющую вала вращения вниз.
5. Закрутите болты

⚠ Внимание Убедитесь, воздушная трубка и провода не скручены между собой

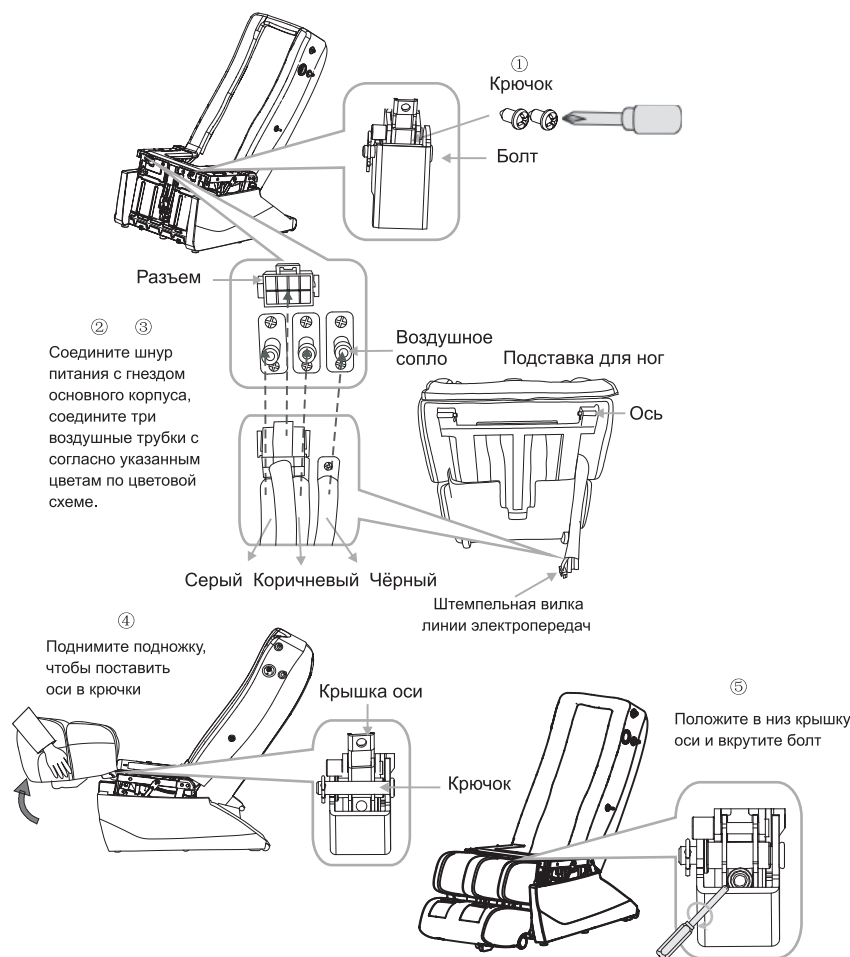


Установка (4)

Шаг 4. Сборка левого и правого подлокотника

1. Открутите винт М6 на каркасе сиденья крестовой отверткой.
2. Нажмите кнопку на фиксирующей шпильке на внутренней стороне подголовника, насадите его на фиксирующую шпильку на боковой стороне спинки.
3. Вставьте квадратную трубку в боковую часть каркаса сиденья.
4. Аккуратно двигайте подлокотник, так, чтобы передняя и задняя панели совпали с отверстием в каркасе сиденья, закрутите М6 в отверстие.
5. Подключите воздушные трубки от подлокотника к сидению в соответствии с цветами.


⚠ После сборки массажного кресла, убедитесь, что воздушные трубки не пережаты. Разборка подлокотников: отключите воздушные шланги между сиденьями и подлокотником, открутите 4 винта на сиденье, поднимите переднюю часть подлокотника, пусть часть трубы квадратного сечения из подлокотника выйдет из пластины рамы сиденья. После этого нажмите кнопку на фиксированном отверстии, с внутренней стороны подлокотника, одновременно потяните за конец подлокотника, с фиксированного болта.

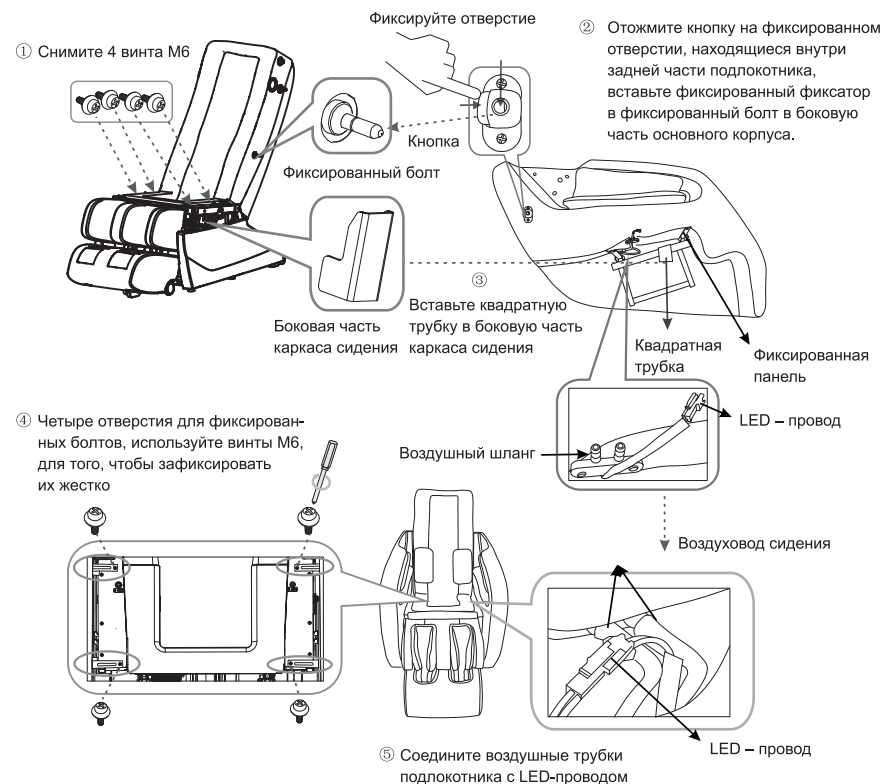

Установка (5)

Шаг 5. Установка левого, правого массажера плеч и пульта управления

1. Два цилиндрических штыря выравните к отверстию на раме. Для этого отожмите их вниз, убедитесь, что соединение плотное. **2.** Подсоедините воздушную трубу на воздушной подушке вокруг молнии на подушки, убедитесь в плотной фиксации. **3.** Подсоедините контролер сумки на липучке с липучкой которая между подлокотником и подушкой безопасности. **4.** Включите контролер в кармане регулятора на внутренней стороне правого подлокотника, включите контролер в кармане гнезда на коробке питания. Убедитесь, что крышка гайки затянута.

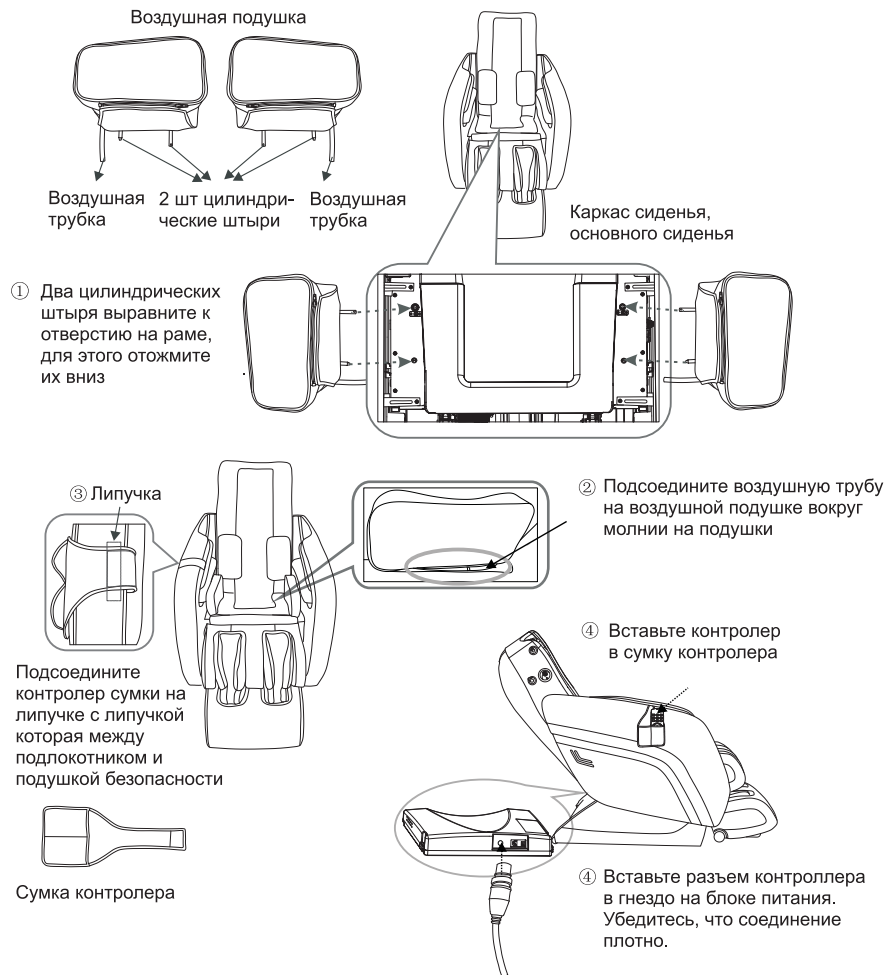

Установка (6)


Шаг 6. Соединение молнии или липучки

Положите подушку заднего сиденья, головную подушку на спинку и соедините две части с застежкой – молнией и липучкой.



Советы по подключению обогрева


Для правильного подключения тепла, и эффективного массажа. Зафиксируйте нижний край подушки для головы вровень с ушами, прежде чем застегнуть указанные две части.

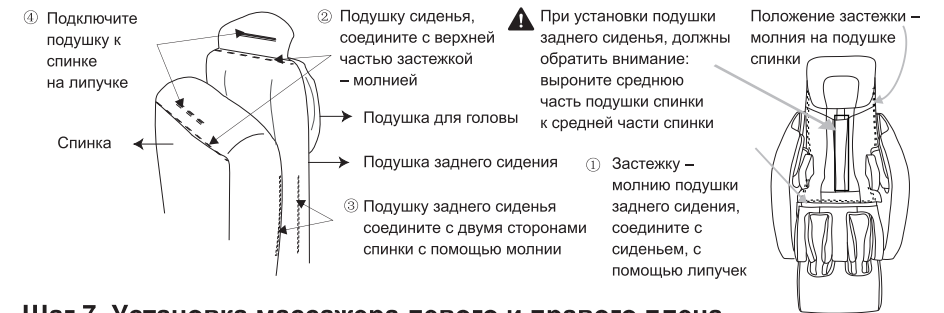

Шаг 7. Установка массажера левого и правого плеча

Во время сборки левого и правого массажеров для плеч, обратите внимание на то, что массажер левого плеча должен быть установлен в левой части спинки, правый массажер плеча к правой части спинки. **1.** Выверните болт, который закреплен на внутренней стороне заднего подлокотника **2.** Соедините провод динамика и воздушную трубу от плечевого массажера с разъемом со стороны спины. **3.** Совместите два осевых отверстия на плечевом массажере и совместите с двумя осями на спинке, плотно вставьте ось в отверстия оси


! **Внимание:** Во время установки не сжимайте воздушную трубку и провод динамика, в противном случае это приведет к отсутствию воздуха в подушках и звука в динамиках.

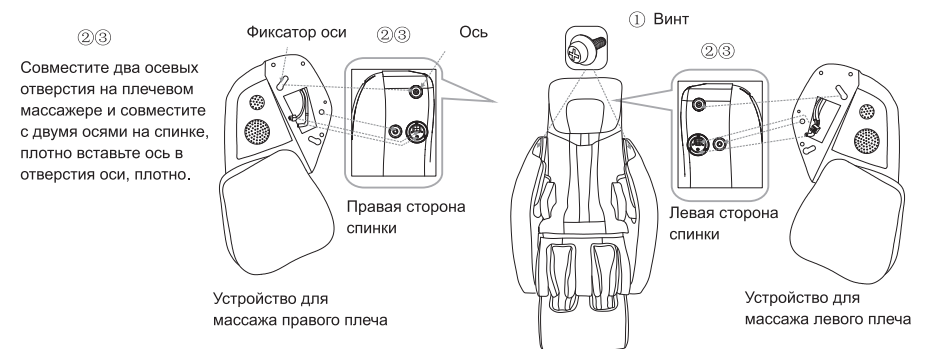

Установка (7)

Шаг 7. Установка левого и правого плеча массажера

4. Поверните массажер плеча вниз, до упора. Зафиксируйте его хорошо.
5. Расстегните край воздушной подушки массажера для плеч, поднимите подушку, совместите отверстия для винта на доске под воздушно-компрессионной подушке с отверстием на подлокотнике, закрутите винт с помощью крестовой отвертки и застегните край подушки.
6. Повторите описанные шаги по сборке, чтобы установить другое устройство для массажера плеча.

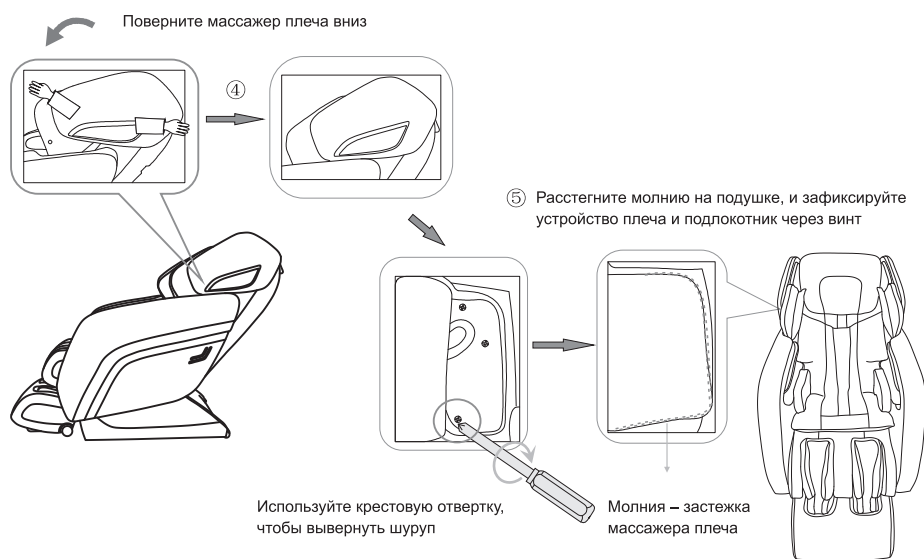


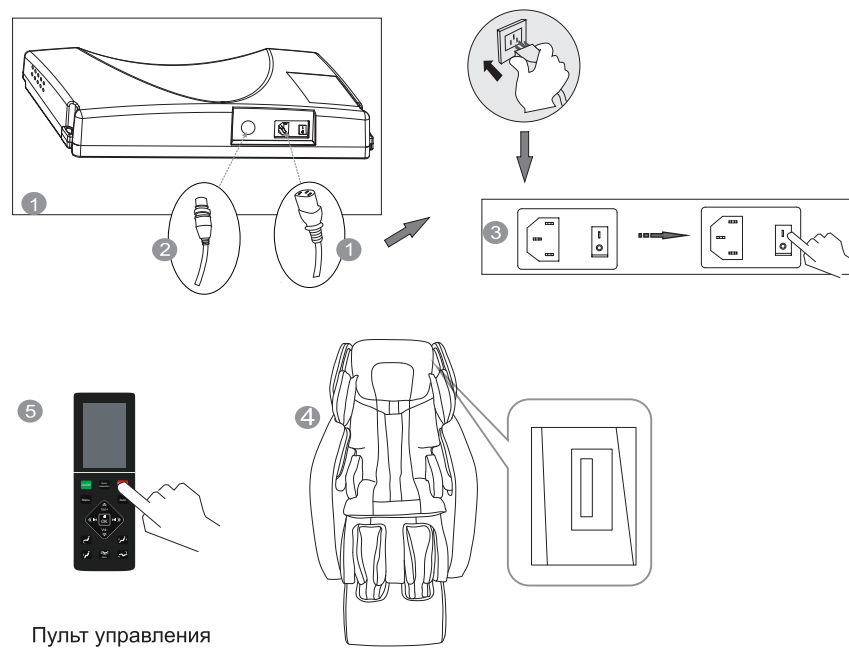
Установка (8)

Шаг 8. После сборки

После сборки используйте кресло в следующем порядке:

1. Подключите шнур питания к блоку питания, как на рисунке.
2. Вставьте разъем контролера в гнездо на блоке питания. Убедитесь, что соединение герметично.
3. Включить (вкл./вык. «0/I», нажмите «I» вниз, чтобы выключить его).
4. Вставьте U-диск в отверстие USB на массажном устройстве левого плеча, для воспроизведения музыки и наслаждайтесь массажем.
5. Насладитесь массажем с помощью пульта дистанционного управления.

 Убедитесь, что переключатель выключено, прежде чем вставить вилку кабеля в розетку.



Место Установки

⚠ Внимание



Не используйте кресло в местах с высокой влажностью, таких как бассейн, ванная комната, для предотвращения утечки и поражения эл.током.




Не используйте кресло под прямыми солнечными лучами или вблизи обогревательных приборов для предотвращения выцветания обивки кресла.



Установите кресло на плоской поверхности, для предотвращения падения, шума или других непредвиденных, неприятных моментов

● Проверьте место перед креслом


Убедитесь, что перед креслом нет людей, домашних животных или посторонних предметов, чтобы спинка и подставка для ног выдвигалась беспрепятственно.

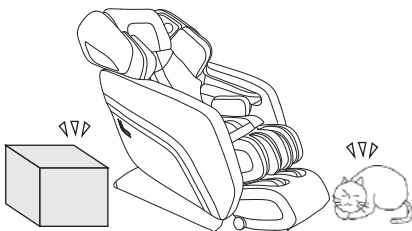

● Проверьте провод питания и розетку

1) Своевременно протирайте розетку от пыли используя сухую ткань


2) Запрещается использовать шнур питания, когда он поврежден, имеет следы ремонта, растянут, перепутан, раздавлен.

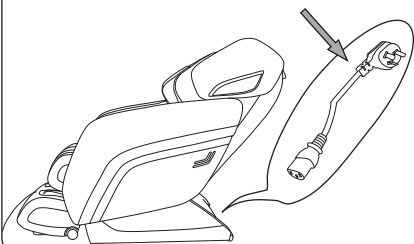

Проверка оборудования

● Пространство вокруг кресла

Минимум 10 см от стены до спинки кресла.


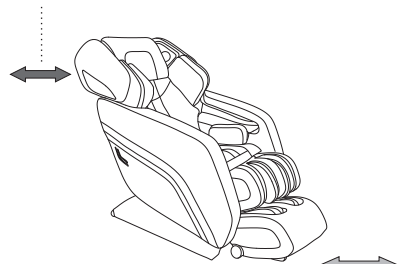


Минимум 30 см перед массажером для ног.

● Проверьте пространство

Когда спинка и подставка для ног раскладывается, обратите внимание на:

1. Нет людей, животных или предметов вокруг кресла.
2. Проверьте достаточно ли пространства вокруг.

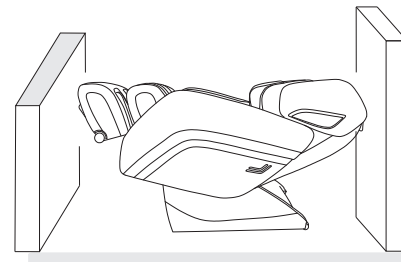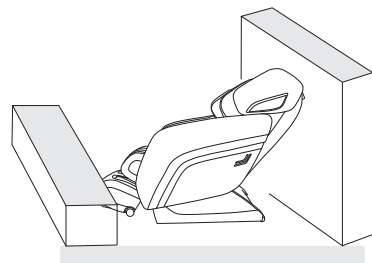

Как перемещать массажное кресло

⚠ Внимание

Во избежание несчастных случаев, не передвигайте массажное кресло, когда оно работает.

● Как перемещать

Сверните провода и положите их на сиденье, чтобы не повредить во время перемещения.

Если вы уронили кресло, внутренние части могут быть повреждены.


Не катайте кресло по деревянному или другому покрытию, которое легко повредить. Для перемещения кресла необходимо не менее двух человек.

Убедитесь, что питание выключено и шнур питания не касается пола. (при перемещении важно держать кресло вертикально, чтобы избежать удара спинки об пол).



● Совет

Поднимите кресло за подставку для ног, чтобы перенести вес на колесики. Затем, толкните кресло до нужного места и поставьте его на пол.

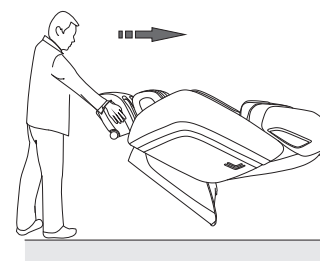


Держите подставку, как на рисунке, чтобы избежать царапин на кожаном покрытии.

Настройки перед сеансом массажа

● Перед настройкой

Перед тем как сесть в кресло, убедитесь, что массажные ролики находятся в правильном положении, затем медленно сядет (во избежание травм, вызванных ударом массажных роликов по голове).

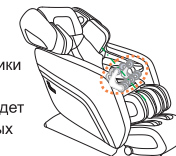

Сканирование тела, определит положение акупунктурных точек. Если массажные ролики не могут определить положение акупунктурных точек, массажер для плеч будет установлен, в самое верхнее положение.

● Правильное положение:

Спинка прилегает к спинке, голова прилегает к подушке.


После сканирования спины пульт управления издает звуковой сигнал, если требуется микроподстройка, просто нажмите кнопку «вверх/вниз» на пульте управления.

В случае, если сканирование определит не верно положение акупунктурных точек на голове, вы не получите полноценный массаж.



● Правильное положение:

Панель Шиаци бедра

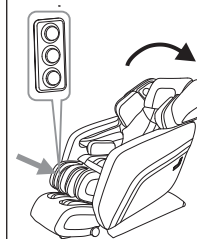


При недостаточной интенсивности массажа, уберите дополнительную подушку или мягкую накидку.


Если вы почувствовали, недостаточное давление массажа на ноги, установите пластины Шиаци на две подушки для ног. Разминающий массаж для мышц ног, повышает кровообращение и снимает усталость.

Так как кресло достаточно тяжелое, оно может повредить пол в процессе долгой работы. Постелите коврик или другое мягкое покрытие.

для защиты пола

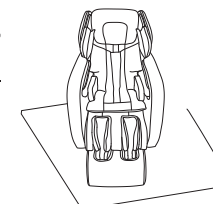

Пульт Управления

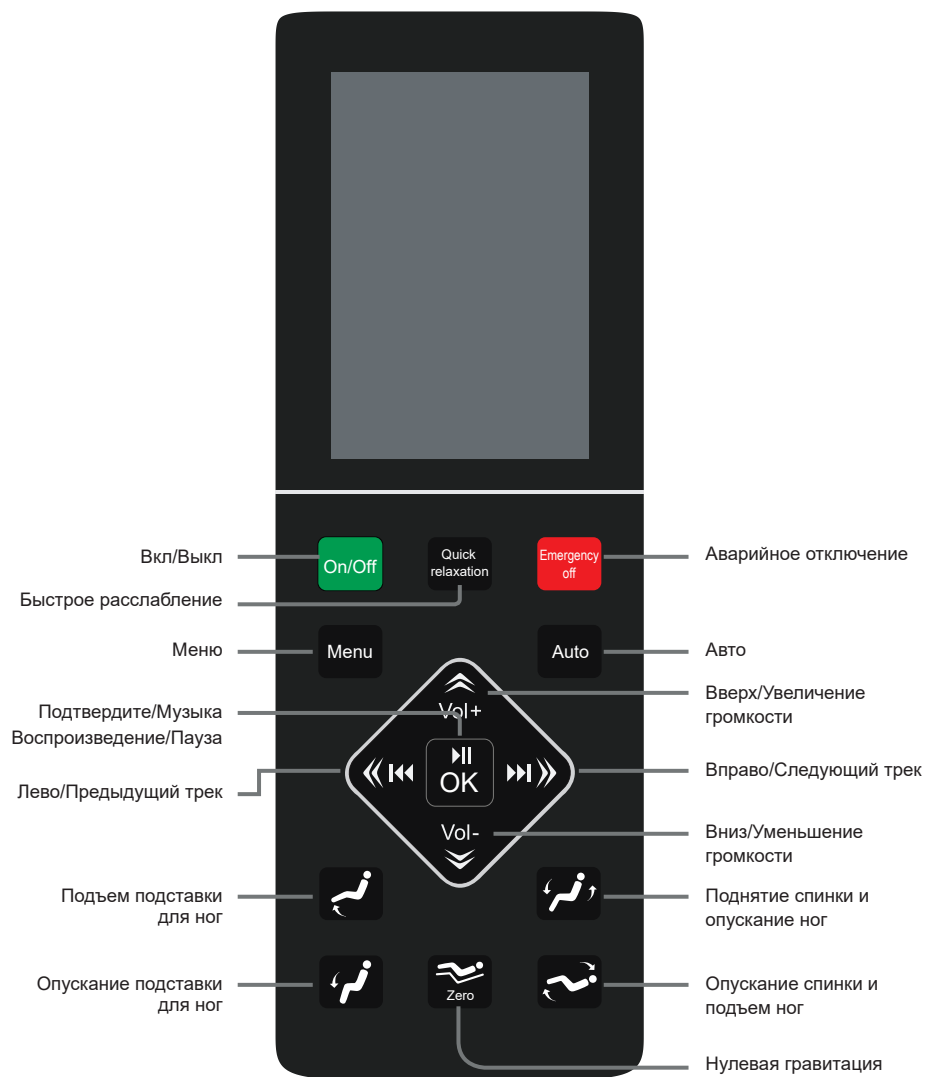



- On/Off** 1. Нажмите эту кнопку, чтобы начать активно использовать массажное кресло. Убедитесь, что кресло подключено к сети, и нажмите кнопку на пульте для включения кресла, для начала сеанса массажа. Если вы нажмете эту кнопку во время работы кресла, оно вернется в исходное положение и выключится. Пульт дистанционного управления выключится в течение 3-5 секунд.
- Quick Relaxation** 2. Быстрое расслабление. Используйте эту кнопку для запуска автоматической 8 - минутной программы, ориентированной на расслабление.
- Emergency Off** 3. Экстренное отключение. Эта кнопка остановит все функции массажа, а кресло вернется в свое стандартное положение и выключится. Чтобы вернуться к массажу, перезагрузите пульт дистанционного управления с помощью кнопки включения/выключения.
- Menu** 4. Меню. Нажмите эту кнопку, чтобы изучить многочисленные доступные функции. Чтобы выйти из меню, нажмите кнопку еще раз.
- Auto** 5. Авто. MC-2000 имеет 5 автоматических программ, доступных через эту кнопку. При каждом последующем нажатии вы можете переключить текущую программу. Доступные автоматические программы включают в себя: "восстановление", "облегчение боли", "растяжка", "синхронизацию музыки", "смарт" и "стоп".- Посмотрите на жидкокристаллический экран, чтобы увидеть текущую запущенную программу.
- Footrest Up** 6. Поднимите подставку для ног. Постоянно удерживайте эту кнопку, чтобы поднять подставку для ног на нужную высоту. Отпустите кнопку, когда вы достигнете желаемой высоты.
- Footrest Down** 7. Опускание подставки для ног. Удерживайте эту кнопку постоянно, чтобы опустить подставку для ног на нужную высоту.
- Vol+ / Vol- / OK** 8. Блок Управления. Используйте 4 кнопки на панели управления для перемещения вверх, вниз, влево или вправо на любом экране меню. Кроме того, вы можете нажать вверх или вниз, чтобы выбрать меню, а также влево или вправо, чтобы перейти к предыдущему или следующему экрану меню. Во время точечного массажа и после теста на обнаружение акупунктурных точек вы также можете произвести настройки массажа.
- OK** 9. OK. Используйте эту клавишу, чтобы выбрать пункт меню и перейти на следующий уровень меню.
- Recline & Leg Down** 10. Поднятие спинки кресла и опускание ног на пол. Удерживайте эту кнопку постоянно, чтобы переместить спинку в сидячее положение и опустить подставку для ног. Отпустите кнопку, чтобы зафиксировать выбранную вами позицию.
- Recline & Leg Up** 11. Опускание спинки и поднимите подставки для ног. Удерживайте эту кнопку, чтобы откинуть спинку и поднять подставку для ног. Отпустите кнопку, чтобы зафиксировать выбранную вами позицию.
- Zero** 12. Нулевая гравитация. Нажмите эту кнопку, чтобы перейти в положение невесомости. Ваше кресло само отрегулируется, а затем остановится. Если вы хотите вернуться в положение по умолчанию, просто нажмите кнопку ноль еще раз.

Описание ЖК-Экрана

Главный интерфейс




Нажмите кнопку ON/OFF, когда включиться питание, раздастся короткий звуковой сигнал. На экране отобразится режим загрузки, а через 2-3 секунды – основной интерфейс, включиться режим ожидания. В основном интерфейсе отобразиться массажная зона, режим массажа, время, громкость музыки, статус подогрева и т.д., вся информация обновиться, когда начнется массаж.

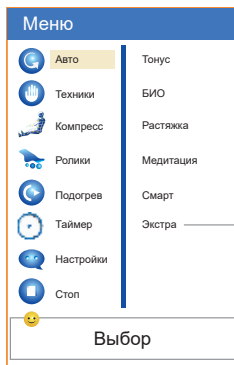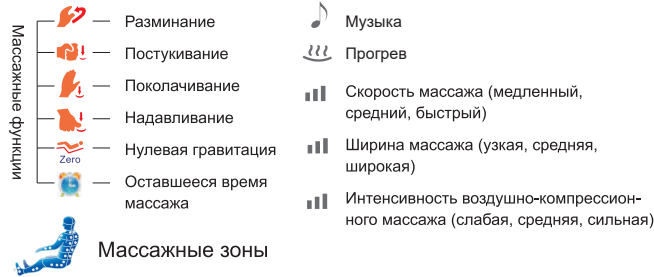

Нажмите кнопку «Меню» для перехода в интерфейс меню, где можно настроить все массажные функции. Нажмите кнопку «Меню», еще раз для возврата в главное меню.


Автоматический режим: нажмите кнопку «Меню», курсор остановиться на автоматическом режиме, нажмите кнопку «ОК» и выберите одну из 5 автоматических программ: Тонус, БИО, Растяжка, Медитация, Смарт, Экстра (Офис, Шопоголик, Йога, Атлетик, Кардио)

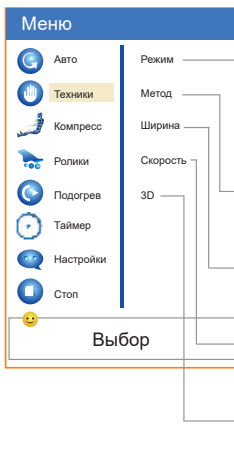

Ручной массаж: Нажмите кнопку «Меню», с помощью навигационных кнопок, нажмите кнопку «ОК», для выбора одной из 5 техник: Режим (Шведский, Бразильский, Китайский, Греческий, Японский) Метода (Все тело, Частичный, Точечный), Ширины (Узкий, Средний, Широкий), Скорости (Нижний, Средний, Высокий), 3D (3D +, 3D -). Выберете подходящую функцию и нажмите «ОК».

Когда массажное кресло работает в ручном режиме, массажа одной зону, можно менять зону массажа с помощью кнопок Вверх / Вниз, информация об этом, отобразиться на экране.

Описание ЖК-Экрана

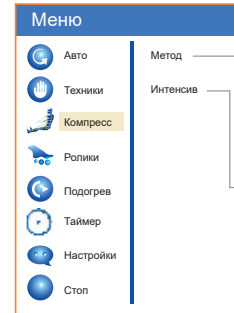

Воздушно-компрессионный массаж: после нажатия кнопки «Меню», выберите «Компресс», нажмите кнопку «ОК» и выберете один из двух видов: Метод (Коррекция, СлимТоп, Талия, Варитон), Интенсив (Нижний, Средний,высокий) и нажмите «ОК».



Ролики: Нажмите кнопку «Меню» на пульте управления, выберите режим «Ролики», имеются три варианта: Сильный, Слабый, Стоп.



Замечания:

1. В полном автоматическом режиме массажа, по умолчанию включены ролики для ног. Если вы не хотите использовать данную функцию, нажмите «Меню»/«Ролики»/«Стоп».
2. В продолжении массажа на руки, плечи, талию или сиденье, компрессионного массажа, массажные ролики для ног по умолчанию отключены. Если вы хотите включить их, нажмите «Меню»/«Ролики»/ «Сильный» или «Слабый».



Подогрев: Нажмите кнопку «Меню» и выберите «Подогрев», у вас имеется возможность установить (отрегулировать) функции массажа – уровень нагрева, время. На экране пульта управления, будет отображена информация о работе подогрева.

Таймер: нажмите кнопку «Меню», выберите «Таймер» и выберите нужное время работы массажного кресла: 10 минут, 20 минут и 30 минут. По умолчанию установленное время работы массажного кресла – 20 минут, после чего массажное кресло автоматически выключается.




Настройки: Нажмите кнопку «Меню», выберите «Настройки», затем выберите «Язык» (Китайский, Английский, Русский), «Bluetooth».

Примечания: После включения питания, массажное кресло начнет поиск акупунктурных точек, процесс будет отображаться на экране. После завершения, звуковой сигнал прозвучит 5 раз с интервалом, секунда, ролики должны находиться на уровне плеч. Если вы решили, что данная позиция не является правильной, вам необходимо нажать кнопки «Вверх»/«Вниз», для того, чтобы выставить ролики на уровне плеч самостоятельно. Процесс будет отображен на экране.

Инструкция по эксплуатации и иллюстрация функций

Вкл./выкл.

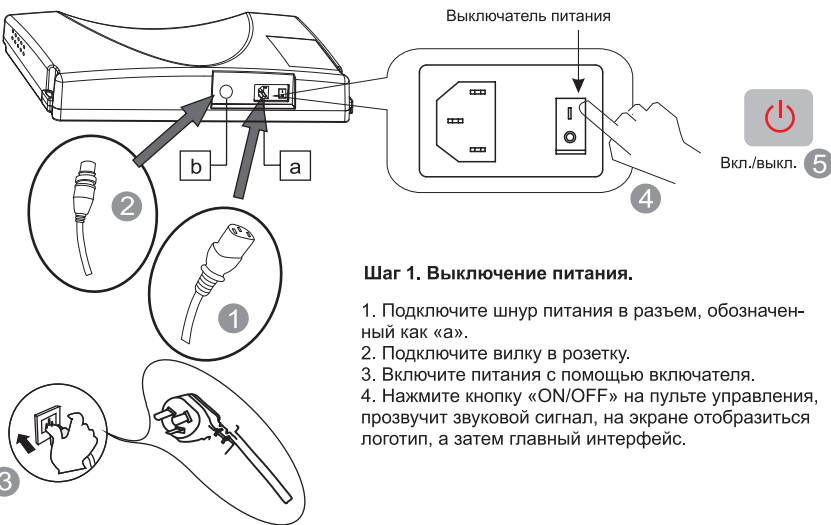

Шаг 1. Выключение питания.

1. Подключите шнур питания в разъем, обозначенный как «а».
2. Подключите вилку в розетку.
3. Включите питания с помощью выключателя.
4. Нажмите кнопку «ON/OFF» на пульте управления, прозвучит звуковой сигнал, на экране отобразится логотип, а затем главный интерфейс.

Шаг 2. Массаж.

1. Управляйте массажным креслом, в соответствии с инструкцией к пульту управления.
2. Когда массаж остановится, кресло вернется в исходное положение, в это время на пульте управления высветится сообщение «Отключение», пульт управления выключится через 2-3 секунды.

Шаг 3. Выключение питания.

1. Нажмите кнопку «ON/OFF» на пульте управления, чтобы выключить массажное кресло и вернуть его в исходное положение.
2. Выключите питание кресла после того, как ролики вернуться в исходное положение.
3. Отключите массажное кресло от сети.

Предупреждение

1. Перед началом использования массажного кресла, проверьте целостность кожаных покрытий спинки кресла. Если оно повреждено, обратитесь в сервисный центр.
2. Подключайте массажное кресло только к исправной розетке.

Внимание

1. Перед тем, как сесть в массажное кресло. Убедитесь, что в нем нет посторонних предметов. В подголовнике, в подставке для ног, в нишах, в сгибах и сиденье кресла.
2. Убедитесь, что массажное кресло вернулось в исходное положение, перед использованием.
3. Не вставайте на массажное кресло во время работы.

Иллюстрации к функциям массажного кресла

Подъем ног
Нажмите эту кнопку на пульте управления, подставка для ног поедет вверх. Отпустите кнопку – подставка для ног, остановится и зафиксируется в этой позиции.

Вытягивание и задвижение подставки для ног
Подставка для ног, регулируется в пределах 20см

Опускание ног
Нажмите эту кнопку на пульте управления, подставка для ног поедет в низ. Опустите кнопку - подставка для ног, остановится и зафиксируется в этой позиции.

Массаж рук
Поместите руки между воздушных подушек на подлокотнике. Поочередно надуваясь, они будут производить массаж кистей и предплечья.

Подъем ног и опускание спинки
Нажмите эту кнопку на пульте управления, спинка опустится в низ, а подставка для ног – поднимется. Опустите кнопку – спинка и подставка для ног будут зафиксированным в данном положении.

Массаж плеч
В области плеч находятся, многослойные воздушные подушки. Поочередно надуваясь, они будут производить массаж плеч и участвовать в вытяжке и массаже спины.

Опускание ног и подъем спинки
Нажмите эту кнопку на пульте управления, спинка поднимется вверх, а подставка для ног – опустится. Опустите кнопку – спинка и подставка для ног будут зафиксированным в данном положении. Процесс настройки отобразится на экране пульта управления.

Растирание ног
Подставка для ног имеет функцию давления и растирание с помощью многослойных воздушных подушек. С помощью функции растирания и давления, снимается усталость ног и повышается кровообращение.

Режим «невесомости»
Нажмите эту кнопку на пульте управления, для перехода в режим «невесомости». При повторном нажатии массажное кресло вернется в исходное положение.


Роликовый массаж ступней
Подставка для ног с воздушно - компрессионным и роликовым массажем, стимулирует рефлекторные зоны ног и меридианы тела, регулирует и восстанавливает работу внутренних органов, улучшает сопротивляемость организма и иммунитета.

Внимание



1. Убедитесь, что нет людей, животных, или любых других предметов в пределах диапазона движения спинки кресла, для того, чтобы избежать травмы и поломки кресла.
2. При регулировании спинки, будьте осторожны, следите за промежутками между спинкой и подголовником.
3. Когда подставка для ног в движении, не вставайте на нее, не пробуйте встать с кресла.

После массажа

1. Убедитесь, что вокруг кресла нет людей или домашних животных, или любых иных предметов в области спинки и подставки для ног

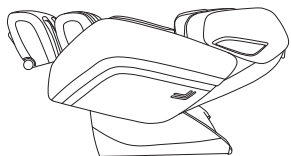

2. Верните спинку и подставку для ног в исходное состояние с помощью пульта управления (или нажмите кнопку «ON/OFF», чтобы это произошло автоматически).

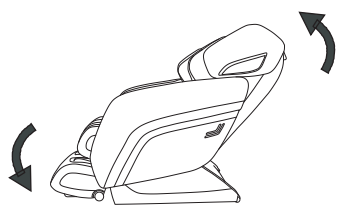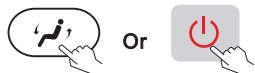


3. Разместите пульт управления в месте хранения (подлокотник).




4. Верните подушку и накидку в исходное положение.

5. Выключите питание в основании кресла.

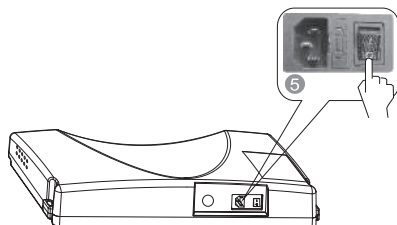

6. Выдерните вилку из розетки (как показано на рисунке).

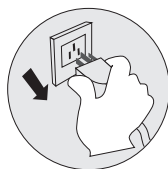

7. Почистите кресло, если это необходимо

Внимание

- После использования кресла нажмите кнопку ON/OFF, чтобы закончить работу и дождитесь возврата кресла в исходное положение.
- Убедитесь, что кресло отключено от сети, чтобы предотвратить случайное включение детьми или домашними животными.
- После использования, выключите питание и отключите от сети. Избегайте сырости, грязи и воздействию прямых солнечных лучей, это может привести к повреждению кресла.

Очистка и обслуживание


Синтетическая кожа

Генеральная очистка

Аккуратно протрите кресло чистой, сухой мягкой тканью.



(Запрещено использовать для очистки химические или медицинские средства)

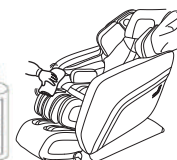

- Если загрязнились кожаное покрытие:
 - смочите мягкую ткань 3-5 процентным нейтральным растворителем и аккуратно смойте пятна на покрытии;
 - ополосните и отожмите ткань;



- протрите кресло влажной тканью;
- дайте высохнуть (не используйте методы быстрой сушки).

Тканевое покрытие

1. Намочите ткань в слабом нейтральном раствором, отожмите и протрите поверхность.

Запрещено использовать:

растворители, полироли, спирт, бензин и тому подобное.

2. Загрязненные части протрите щеткой с нейтральным раствором. Слишком интенсивный нажим, может повредить ткань.
3. Протрите влажной тканью.
4. Оставьте сохнуть.



Пластиковые детали

1. Смочите мягкую ткань нейтральным растворителем и аккуратно смойте пятна на покрытии.



2. Протрите влажной тканью.

3. Оставьте сохнуть.

Очистка пульта управления

1. Протрите влажной тканью.
2. Оставьте сохнуть.

Запрещено использовать:

- Растворители;
- Бензин;
- Спирт;
- Полироли.



Чистка

- Перед чисткой отключите массажное кресло от эл.сети;
- Убедитесь, что руки сухие при прикосновении к шнуру питания;
- Несоблюдение данных инструкций может привести к поражению эл.током или возгоранию.

Неисправности

Проблема	Возможная причина	Решение
Массажное кресло не работает после включения	Проверьте, включен ли пульт	Включите кресло «ON/OFF»
	Не выбран режим массажа	Выберите программу массажа
	Проверьте, надежно ли подключена вилка в розетку	Проверьте все разъемы
	Неисправны провод или розетка	Обратитесь в сервисный центр
	Сгорел предохранитель	Замените предохранитель
	Неполадки во внутренних микросхемах	Обратитесь в сервисный центр
Шум во время работы	Работа воздушного насоса, мотора или внутренних механизмов	Это нормальный звук, не нужно обращать на него внимание
Правый и левый ролик находятся на разной высоте	Ролики работают поочередно	Это нормальный режим, не нужно обращать на него внимание
Шум во время работы усиливается и становится громче	Возможен перегрев при длительной работе	Выключите питание на 30 минут и включите повторно
	Внутренние части трутся друг о друга – это нормально. После длительного простоя, высохла смазка	Смажьте доступные узлы силиконовой смазкой или литолом или обратитесь в сервисный центр для проверки
Массаж внезапно прерывается	Кресло обесточено	Подключите электропитание
	Время сеанса закончилось	Выключите питание, сделайте перерыв на полчаса до следующего включения
Массажное кресло не раскладывается	Проверьте, нет ли каких-либо препятствий для движения спинки или подставки для ног. В целях безопасности, кресло останавливает работу	Уберите посторонние предметы, включите питание, сделайте перерыв полчаса до следующего включения
Кресло не возвращается в исходное положение	Поломка или время сеанса закончилось	Отключите электропитание и обратитесь в сервисный центр
Электрический провод или вилка нагрелись	Перегрузка или длительная непрерывная работа	Выключите питание на 30 минут и включите повторно
	Иные причины	Отключите электропитание и обратитесь в сервисный центр

Скрип движущихся частей при сохранении нормального функционирования кресла НЕ ЯВЛЯЮТСЯ поломкой, возникает в результате высыхания смазки, устраняется самостоятельно или на платной основе. НЕ является гарантийным случаем.



Если произошло нарушение работы массажного кресла, не связанное с вышеуказанными причинами, прекратите использование массажного кресла и свяжитесь с сервисным центром для диагностики и ремонта массажного кресла.

Технические данные

Наименование	Массажное кресло	Мощность	200W
Модель	Серия RK	Вес брутто/ нетто	Массажное кресло: 81,3/8,3 кг Подлокотник: 13/18,5 кг Подножка для ног: 21,3/24,3 кг
Напряжение	<input type="checkbox"/> AC120V, 60Hz <input type="checkbox"/> AC220V, 50/60Hz <input type="checkbox"/> AC240V, 50Hz		
Класс безопасности	Класс 1	Размеры упаковки	Массажное кресло: 1470*745*940 мм Подлокотник: 1050*370*675 мм Подножка для ног: 540*520*565 мм (длина*ширина*высота)

Дата производства: смотреть на массажере

Производитель: SHANDONG KANGTAI INDUSTRIAL CO., LTD

Сделанно: в Китае

Адрес производителя: No. 389, Jincheng Road, Zhaoyuan, Shandong, China, 265400

Телефон: 86-021-66318109

Генеральный импортер в России:

ООО «Макс Концепт», ОГРН 1147453008532

109518, Москва, ул. Гайвороновская, д. 4, стр. 1

Все авторские права на тексты и изображения принадлежат Ergonova GmbH и ее не могут использоваться иначе, только с согласия правообладателя

Авторское право © 2012 г.

Ergonova GmbH

Все права защищены

Представительство в ТЦ «МЕГА Белая Дача»

1-й Покровский пр-д, д. д.5, г. Котельники, Люберецкий р-н,

Московская область

Телефон: 8-800-700-14-29

Info@ergonova.ru

www.ergonova.ru

Утилизация

Извлеките из розетки вилку, отрежьте сетевой шнур вместе с вилкой. Из массажного кресла путем экологической утилизации можно получить дорогостоящее сырье.